



Olá!

Para você que quer trabalhar com os Pluri Alinhadores Dentais, mas possui dificuldade em entender quais casos são indicados e quantas placas ortodônticas serão necessárias, criamos este roteiro explicativo para facilitar a observação clínica nos seus pacientes.

Devemos lembrar que a previsibilidade com os alinhadores deve ser considerada, mas que depende de alguns fatores, como tamanho de dentes, tipos de movimentos e horas de uso pelo paciente. Por isso, essa previsão estará sujeita a refinamentos, que poderão incluir mais placas para uma ótima finalização.

O ponto de partida na nossa avaliação clínica é observar a quantidade de apinhamentos dentários, e por isso temos que quantificá-lo. Devemos avaliar a quantidade de espaço REQUERIDO para a finalização do alinhamento e que se NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE EXPANDIR as arcadas, OS DESGASTES DENTÁRIOS SERÃO NECESSÁRIOS.

Assim, considera-se:

APINHAMENTO LEVE: de 1 à 5mm, sendo que nesses casos a quantidade de placas necessárias será em torno de 7 à 12 placas alinhadoras.

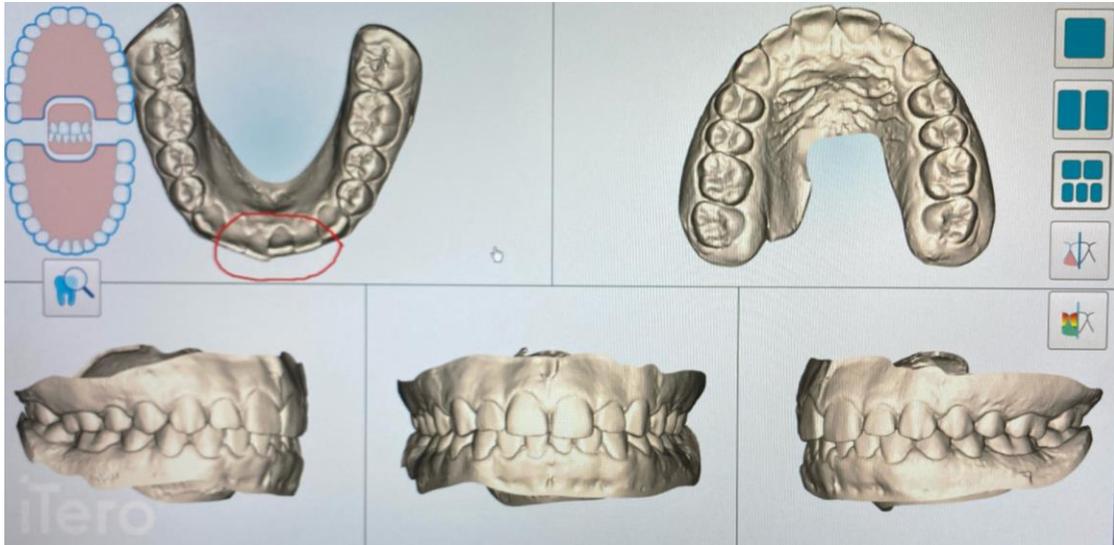


Figura 1: Apinhamento leve, até 7 placas

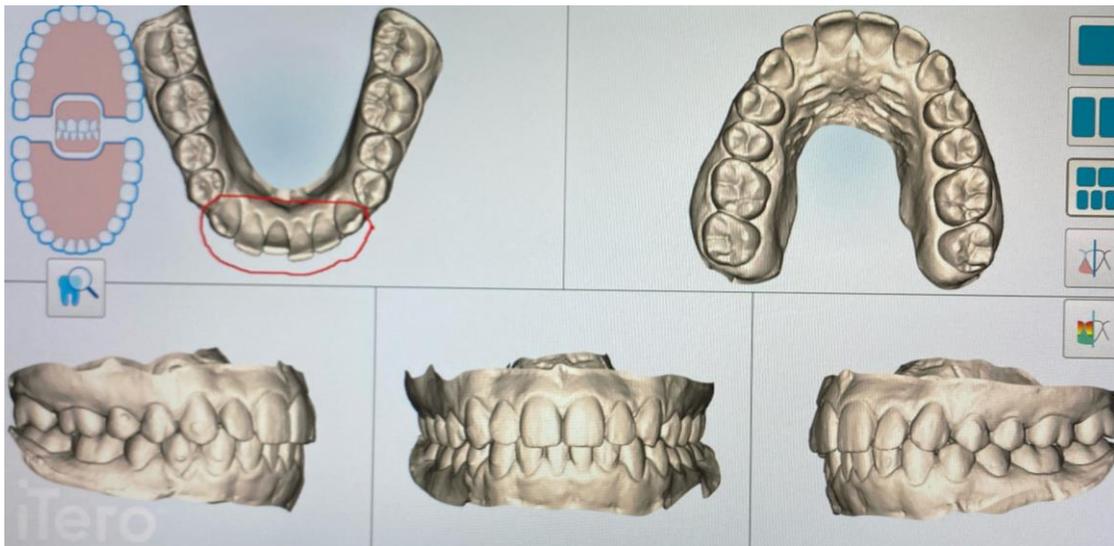


Figura 2: apinhamento leve até 10 placas

APINHAMENTO MODERADO: de 6 à 9mm, sendo que nesses casos a quantidade de placas necessárias será em torno de 10 à 20 placas.

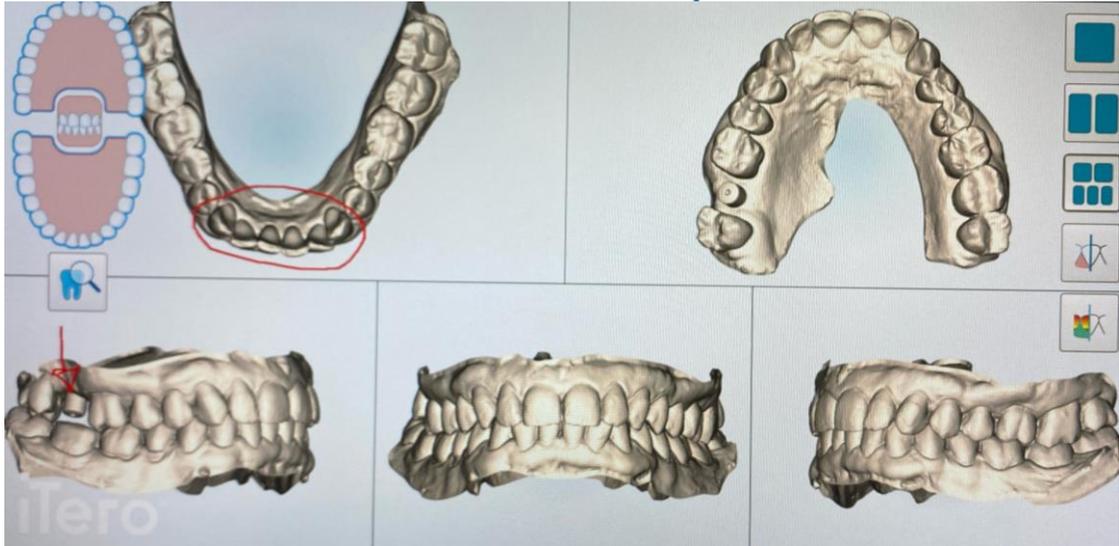


Figura 3: apinhamento moderado até 15 placas



Figura 4: apinhamento moderado até 15 placas

APINHAMENTO SEVERO: a partir de 9mm. Sendo assim, o ortodontista deverá ponderar a possibilidade de extrações dentárias ou associar mecânicas distalizadoras com recursos de ancoragem como os miniimplantes. Para esses casos sempre serão necessárias mais de 21 placas.



Figura 5: apinhamento severo mais de 30 placas e diagnóstico para extrações

Outro ponto a ser considerado são as **ROTAÇÕES DENTÁRIAS**, uma vez que esse tipo de movimento é de baixa previsibilidade e necessita de attachments e mais placas para a execução. Portanto, o apinhamento pode ser leve, mas por existir muitas rotações, necessita de mais placas.

Observe:

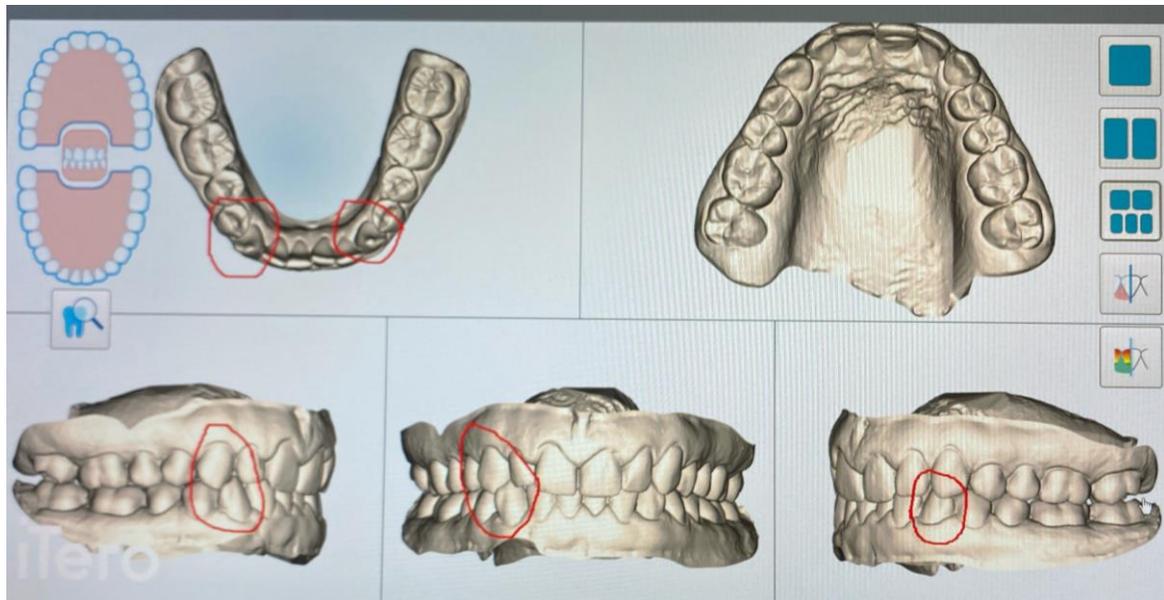


Figura 6: apinhamento leve, mas muitas rotações nos caninos. Mais de 21 placas

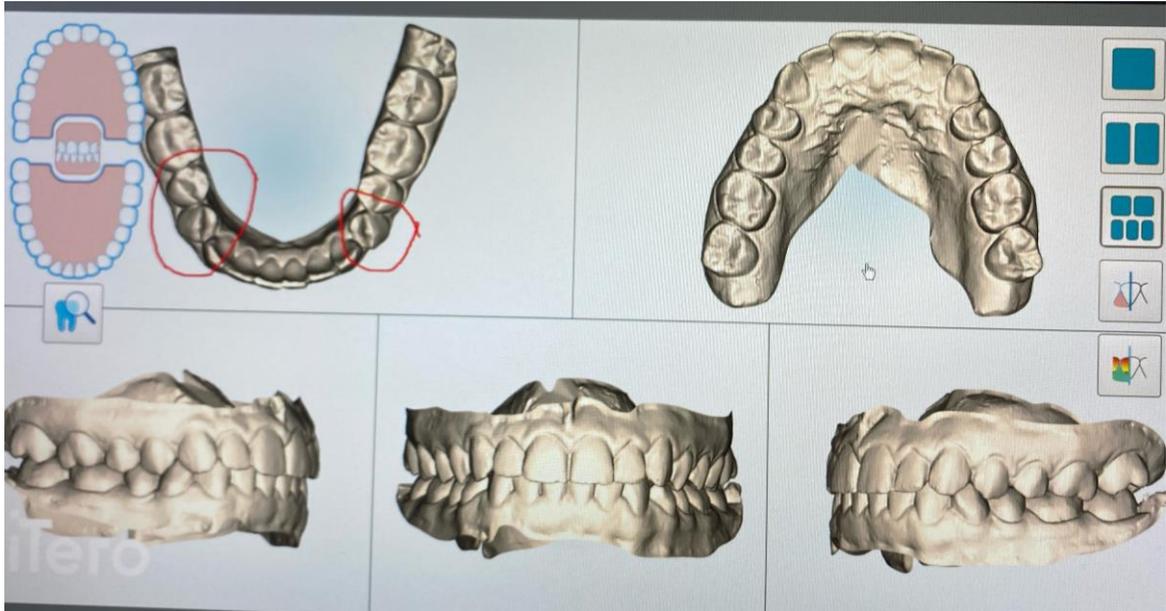


Figura 7: Apinhamento leve, com rotações em pré-molares. Totalizou 30 placas

Para correções sagitais (Antero-posteriores), os alinhadores tb podem ser indicados, e nesses casos os elásticos intermaxilares auxiliam na ancoragem do movimento. Observe que nesses casos há pouco apinhamento, por isso foi utilizado poucos pares de placa, até 15 placas.

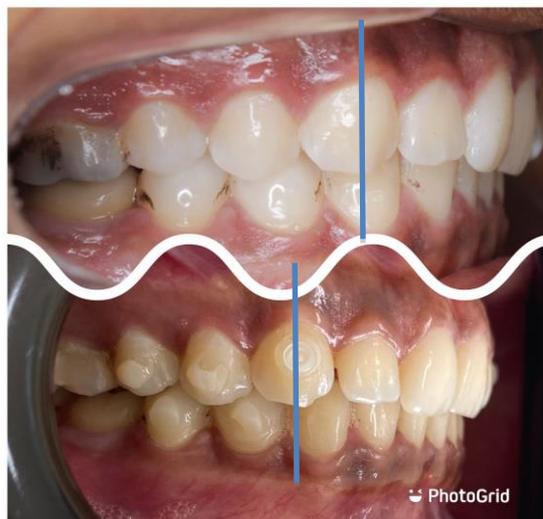


Figura 8: Correção Classe II



Figura 9: Correção da Classe III

Esperamos que esse breve roteiro auxilie a desvendar a dificuldade em indicar os Plurialinhadores e que te motive na utilização dessa ferramenta de trabalho, que otimiza o seu tempo de consulta.

Podem contar com a equipe Plurialinhadores!!!!

"Convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida, faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida, se inova, se reinventa."

Mario Sergio Cortella